

Инструкция по настройке качества изображения для Термопленки реестров «4777», «4888», «4999»

1. Термопленка реестр «4777»

Для работы с термопленкой реестра 4777 необходимо:

1. Выставить на видео принтере печать в режиме **S** и выставить стандартную **яркость 0**
2. Если изображение неудовлетворительное, необходимо понизить яркость в режиме **S** от – **30** до – **40**.
3. Если изображение все еще неудовлетворительное, необходимо переключить видео принтер в режим печати **HD** и выставить стандартную **яркость 0**.
4. Если изображение все еще неудовлетворительное, необходимо **уменьшить или увеличить яркость** в режиме **S** или **HD** чтобы добиться необходимого качества изображения.

2. Термопленка реестр «4888»

Для работы с термопленкой реестра 4888 необходимо:

1. Выставить на видео принтере печать в режиме **HD** и выставить стандартную **яркость 0**
2. Если изображение неудовлетворительное, необходимо уменьшить или увеличить яркость в режиме **HD** чтобы добиться необходимого качества изображения.

3. Термопленка реестр «4999»

Для работы с термопленкой реестра 4999 необходимо:

1. Выставить на видео принтере печать в режиме **HG** и выставить стандартную **яркость 0**
2. Если изображение неудовлетворительное, необходимо **уменьшить или увеличить яркость** в режиме **HG** чтобы добиться необходимого качества изображения.